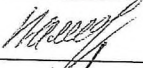



 <p>ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ</p>	Стандартная операционная процедура	СОП 2020 Первая редакция
		Лист 1 из 4
	<p>СОП Как использовать противочумный комплект СИЗ «КВАРЦ»</p> <p>Введена в действие 07.04. 2020г.</p>	


	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утверждено:	И.о.главного врача	Валеева Ф.А.		17.04.20
Разработано:	Главная медсестра	Курбаншоева В.П		07.04.20
Оформлено	Главная медсестра	Курбаншоева В.П		07.04.20
Согласовано	Врач –инфекционист	Сайфутдинова С.К.		17.04.20

Как надевать противочумный комплект СИЗ «КВАРЦ»

Наденьте комплект до того, как войдете в очаг инфекционного заболевания.

1. Расстегните текстильную застежку на комбинезоне.
2. Наденьте брюки комбинезона.
3. Наденьте рукава комбинезона по очереди. Не надевайте оба рукава одновременно, чтобы не порвать комбинезон.
4. Наденьте бахилы, заправив под них брюки, завяжите завязки бахил.
5. Вставьте в клапан комбинезона полотенце.
6. Приверните фильтр к полумаске шлема.
7. Натрите стекла полумаски шлема сухим мылом, чтобы они не запотевали.
8. Наденьте полумаску шлема.
9. Наденьте защитную оболочку шлема.
10. Затяните и завяжите ленту по горловине шлема.

11. Заправьте пелерину шлема под комбинезон.

	ГБУЗ РБ Янаульская	Стандартная операционная процедура	СОП 2020 Первая редакция
			Лист 2 из 4
		СОП Как использовать противочумный комплект СИЗ «КВАРЦ»	
		Введена в действие	07.04. 2020г.

12. Затяните текстильную застежку комбинезона снизу вверх, равномерно надавливая верхнюю часть на нижнюю.

13. Проверьте, что на застежке не осталось отверстий.

14. Наденьте перчатки, заправив под них подрукавники, сверху опустите рукава комбинезона.

15. Наденьте вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона.

16. Убедитесь, что вам удобно будет работать в костюме в течение трех–четырёх часов.


Как снимать и обеззараживать противочумный комплект СИЗ «КВАРЦ»

Когда закончите работу, снимите комплект в специально выделенном для этого помещении или в комнате, где работали, после полного ее обеззараживания. Снимайте комплект только самостоятельно, очень медленно, осторожно, по возможности перед зеркалом.

После каждого шага обрабатывайте руки 3% раствором хлорамина.

1. В течение одной–двух минут тщательно вымойте руки в перчатках в 3% растворе хлорамина.
2. Снимите верхние перчатки, положите в емкость с дезинфицирующим раствором.
3. Медленно снимите полотенце, положите в емкость с дезинфицирующим раствором.
4. Снимите бахилы, развязав завязки, погрузите их в емкость с дезинфицирующим раствором.
5. Расстегните текстильную застежку на комбинезоне.
6. Снимите рукава комбинезона.

7. Снимите перчатки с подрукавников комбинезона.

	ГБУЗ РБ Янаульская	Стандартная операционная процедура	СОП 2020 Первая редакция
			Лист 3 из 4
		СОП Как использовать противочумный комплект СИЗ «КВАРЦ»	
		Введена в действие	07.04. 2020г.

8. Снимите штанины комбинезона и погрузите комбинезон в емкость с дезинфицирующим раствором.

9. Снимите защитную оболочку шлема, развязав стягивающую ленту по горловине.

10. Снимите полумаску, оттягивая двумя руками вперед, вверх и назад.

11. Отверните фильтр. Полумаску погрузите в дезинфицирующий раствор, фильтр поместите в мешок.

12. Снимите перчатки, в дезинфицирующем растворе проверьте, целые ли они.

13. Вымойте руки мыльным раствором.

Как дезинфицировать противочумный комплект СИЗ «КВАРЦ»

1. Проведите обработку при температуре 58 °С в течение 180 минут в дезинфекционной камере.

2. Тщательно просушите комплект в разобранном виде.

3. Фильтр продезинфицируйте в сухожаровом шкафу при температуре 160 °С в течение четырех часов.

4. Поместите фильтр в автоклав на сетки на полтора часа при давлении 2 атм.

Один фильтр можно автоклавать 10 раз, после этого он приходит в негодность.

